




ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

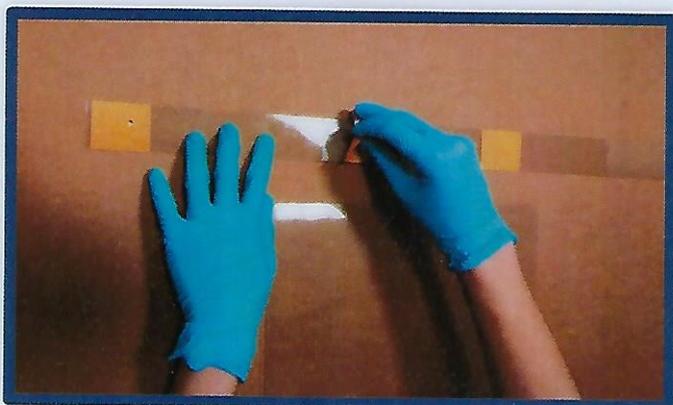


1. Αφαιρούμε το δεύτερο αυτοκόλλητο από τη κορδέλα στήριξης .

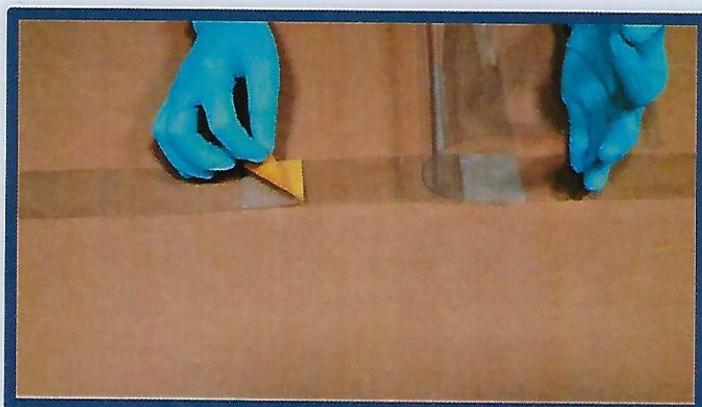

2. Κολλάμε τη δεξιά γωνία της ασπίδας στο αυτοκόλλητο .

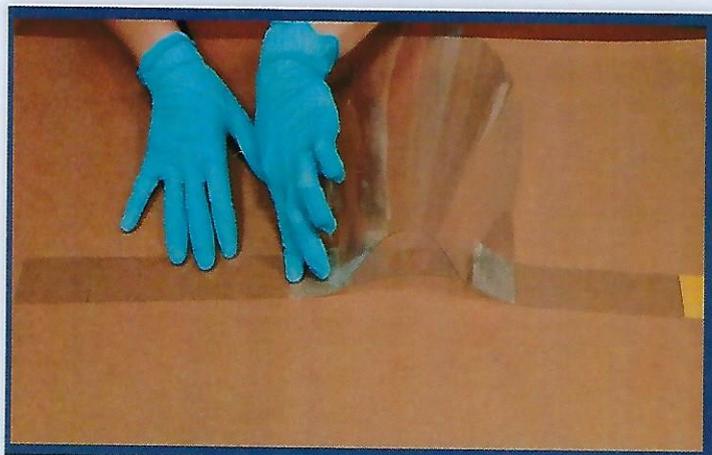

3. Κολλάμε τη δεύτερη γωνία δημιουργώντας διάκενο μεταξύ κορδέλας και ασπίδας .

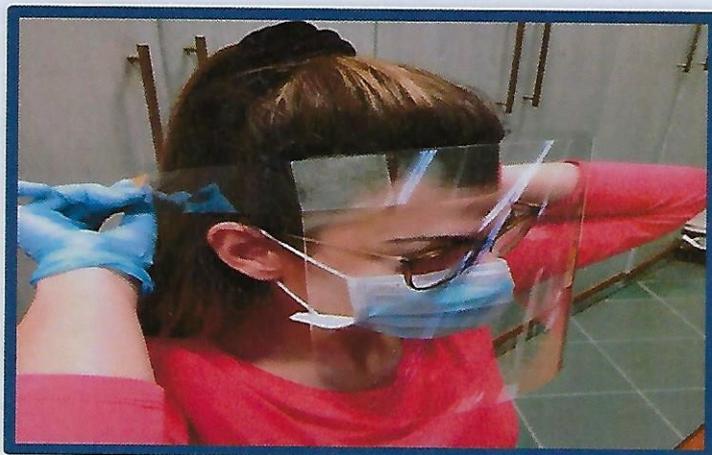

4. Τοποθετούμε τη κορδέλα στήριξης στο μέτωπο προσαρμόζοντας την ανάλογα .



5. Τέλος εφαρμόζουμε τη κορδέλα στο κεφάλι κολλώντας το τρίτο αυτοκόλλητο.